



medi

Genumedi[®] plus




Kniebandage
Knee support
Genouillère rotulienne
Rodillera

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi.
Instrucciones de uso. Instruções para aplicação.
Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning.
Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu.
Инструкция по использованию. Kullanna kilavuzu. Instrukcja
zakładania. Használati útmutató. Uputstvo za upotrebu. Інструкція з
використання. Navodila za uporabo.

medi. I feel better.



1

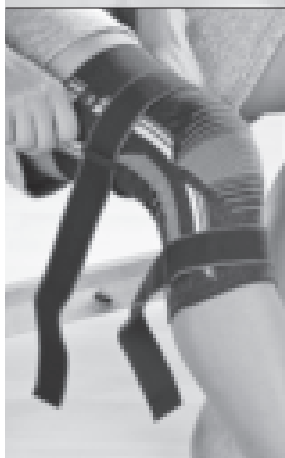

2



3



4



5

Genumedi® plus

Назначение

Бандаж на коленный сустав и ремешками Genumedi plus может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения бандажа.

Показания

- Артрит и артроз коленного сустава
- Отеки и выпот в полость сустава
- Хроническое послеоперационное и посттравматическое воспаление коленного сустава
- Пателло-фemorальный болевой синдром

Противопоказания / нежелательные явления

В редких случаях при использовании бандажей (или схожих изделий) возможно возникновение чрезмерной локальной компрессии, приводящей к сдавлению кровеносных сосудов или нервов. Этого можно избежать, если ослабить ремень или застежку. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением изделия в следующих случаях:

- повреждения кожи в области контакта с изделием, особенно в случае наличия признаков воспаления (повышенная температура, отек или покраснение).
- нарушения чувствительности или кровоснабжения в области нижних конечностей (например, при диабете)
- нарушения лимфатического оттока (например, отек мягких тканей нижней конечности неизвестного происхождения)

Также следует проконсультироваться с врачом в случае, если Вы собираетесь применять бандаж совместно с другими компрессионными изделиями.

Принцип действия

Массажное воздействие, осуществляемое с помощью компрессионной ткани и силиконовой вставки, улучшает кровоснабжение и ускоряет рассасывание гематом и отеков. Специально разработанная форма бесшовного бандажа улучшает проприоцептивную чувствительность, за счет чего усиливается мышечная поддержка и стабилизируется коленный сустав.

Максимальный лечебный эффект бандажей проявляется при физических нагрузках. Бандаж можно использовать непрерывно в течение всего дня. Следует помнить, что нельзя сгибать колено, более чем на 70° в положении сидя. При длительном отдыхе и во время сна бандаж следует снимать.

Если при пользовании изделием у Вас возникли болезненные или неприятные ощущения, пожалуйста, немедленно снимите изделие и проконсультируйтесь с врачом или персоналом ортопедического салона. Бандаж возможно использовать, находясь в воде. Следует помнить, что после этого его необходимо тщательно прополоскать в чистой воде и высушить.

Рекомендации по надеванию

- Ослабьте оба ремешка.
- Возьмите бандаж за верхний край, расположив большие пальцы внутри изделия (рис. 1).
- Потяните бандаж за верхние концы боковых спиральных стержней. Расположите бандаж так, чтобы надколенник охватывался силиконовым кольцом (рис. 2,3).
- Застегните оба ремешка (рис. 4).
- Для снятия бандажа захватите нижние концы боковых лент и стяните изделие вниз (рис. 5).

В первый раз бандаж рекомендуется надевать после инструктажа, проведенного обученным специалистом.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Можно не вытаскивать силиконовое кольцо перед стиркой. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Состав:

Полиамид, эластан

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!